

- de** Produktinformation
- en** Product information
- fr** Information sur le produit
- it** Informazioni sul prodotto
- es** Información sobre el producto
- pt** Informações sobre o produto
- ru** Информация об изделии



# Stethoskope



QM-1-025L




<b>de</b>	Stethoskope .....	6
<b>en</b>	Stethoscopes .....	8
<b>fr</b>	Stéthoscopes .....	10
<b>it</b>	Stetoscopi .....	12
<b>es</b>	Estetoscopios .....	14
<b>pt</b>	Estetoscópios .....	16
<b>ru</b>	Стетоскопы .....	18





- de** z.B. Noroscop umschaltbar
- en** For example: Noroscop dual-function
- fr** p.ex. Noroscop commutable
- it** ad es. Noroscop con canale selezionabile
- es** p.ej. estetoscopio Noroscop con válvula selectora
- pt** por ex. Noroscop comutável
- ru** например: Noroscop с переключаемой головкой

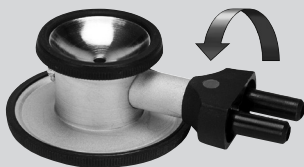



**Rapport**



**Kirchner Colorscope  
Plano**



**Kirchner Colorscope  
Duo**



**Single**



**Double**



**Prestige-Baby  
light**



**Prestige-Child  
light**



**Prestige-Standard  
light**



**Prestige-Baby**



**Prestige-Child**



**Prestige-Standard**



**Ограничения регенерации:** Частая повторная подготовка к эксплуатации не имеет значительного воздействия на инструменты. Снятие продукта с эксплуатации происходит как правило из-за износа или поломки/повреждения изделия при употреблении.

### Указания

**Рабочее место:** Загрязнение на поверхности удалить одноразовой/бумажной салфеткой.

**Хранение и транспорт:** Для защиты от загрязнения и запыления храните стетоскоп в упаковке.

**Подготовка к очистке:** Никаких особых требований.

**Ручная очистка:** Ушные дужки и трубки можно чистить с помощью алкоголя или слабого мыльного раствора. Ушные оливки необходимо отвинтить и промыть в слабом мыльном растворе. Мембрану можно промыть в слабом мыльном растворе, предварительно освободив её от стопорного кольца.

**Автоматическая очистка:** Автоматическая чистка невозможна.

**Дезинфекция:** При применении чистящих и дезинфекционных средств, таких как Meliseptol®/Meliseptol® rapid обратите внимание на указанную производителем концентрацию и время дезинфекционной выдержки.

**Техническое обслуживание:** Поврежденные части отсортировать и заменить.

**Контроль и эксплуатационная проверка:** Проверьте мембрану, трубки и ушные дужки на предмет наличия повреждений. Система должна быть целостной. Перед использованием проверьте правильность насадки ушных оливок и настройте индивидуально ушные дужки.

**Упаковка:** По отдельности: можно использовать обычный полиэтиленовый пакет. Пакет должен соответствовать размерам изделия.

**Стерилизация:** Достаточно простой очистки, так как стетоскоп не предназначен для оперативного вмешательства.

**Хранение:** Храните стетоскоп в сухом месте.

**Дополнительная информация:** Соблюдайте информацию об изделии.






**Общие принадлежности:** Дополнительную информацию по данному изделию Вы найдете на нашем сайте: [www.kawemed.de](http://www.kawemed.de).

Производитель: **KaWe**

**Контакт с производителем:** Адрес или номер телефона продавца в сети специализированной торговли или наберите +49-7141-68188-0.

**Утилизация:** Данное изделие разрешается утилизировать с бытовыми отходами.

### **Обозначение символов:**

	Производитель
	Дата изготовления
	Партия товара
	Соблюдать информацию об изделии
	Внимание!



- de** Alle Angaben ohne Gewähr - Änderungen vorbehalten.
- en** All information is without guarantee and subject to change.
- fr** Informations sous toutes réserves - Sous réserve de modifications.
- it** Tutte le informazioni sono fornite senza alcuna garanzia e possono essere modificate.
- es** Toda la información sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar cambios.
- pt** Todas as indicações entendem-se sem compromisso – Sujeito a alterações sem aviso prévio.
- ru** Информация представлена без гарантий любого рода – оставляем за собой право вносить изменения.



**KIRCHNER & WILHELM** GmbH + Co. KG  
Eberhardstr. 56 • 71679 Asperg • Germany

**Zentrale / Central office**

Fon: +49 -7141-68188-0

Fax: +49 -7141-68188-11

Email: [info@kawemed.de](mailto:info@kawemed.de)

Internet: [www.kawemed.de](http://www.kawemed.de)